

**Wiba Sport AG**  
Spahau 1 • 6014 Luzern  
Telefon 041 250 80 80  
info@wiba-sport.ch  
www.wiba-sport.ch




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
## Produktinformationsblatt

### Mehrfach-Kalt/Warmkomresse

**Kalt Anwendung:** Die Komresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Warm Anwendung:** Die Komresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Komresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Komresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Artikelnummer: D6125**

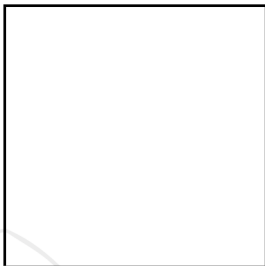

### Zubehör zum Artikel

