




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

Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkomresse

Kalt Anwendung: Die Komresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Warm Anwendung: Die Komresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Komresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Komresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6116

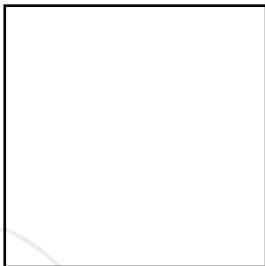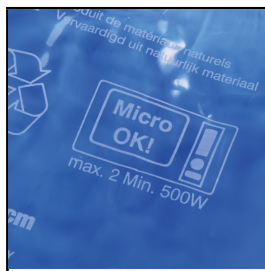

Zubehör zum Artikel

- D6115 - Mehrfach-Kalt/Warmkomresse - 16 x 26 cm
- D6118 - Mehrfach-Kalt/Warmkomresse - 8 x 13 cm
- D6119 - Mehrfach-Kalt/Warmkomresse - alle Grössen
- D6124 - Mehrfach-Kalt/Warmkomresse - 13 x 14 cm
- D6125 - Mehrfach-Kalt/Warmkomresse - 12 x 29 cm



D6115



D6118



D6119



D6124



D6125