






## Produktinformationsblatt

### Mehrfach-Kalt/Warmkomresse

**Kalt Anwendung:** Die Komresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Warm Anwendung:** Die Komresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Komresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Komresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Komresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Artikelnummer: D6125**

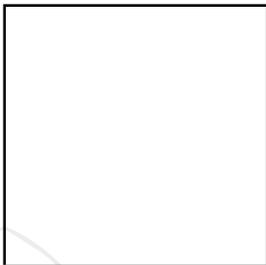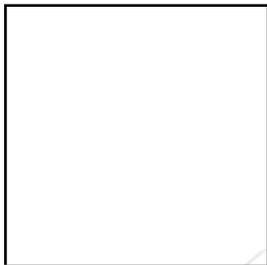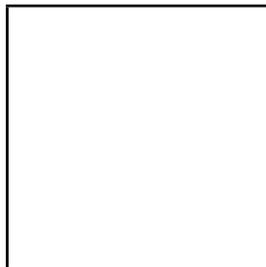

## Zubehör zum Artikel

